

Vaka İnceleme


No. **1**

GentleYAG[®]



with
DCD

GentleYAG™ Tedavileri

Tüy Giderme

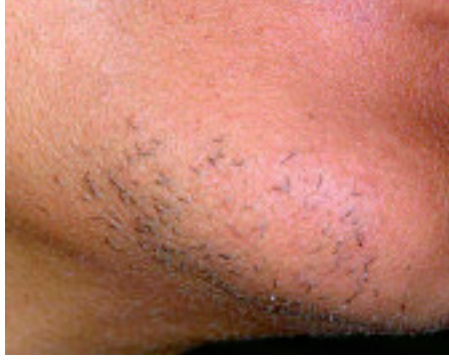

Deri Tipi V-VI 12 mm, 30 J/cm², 3 ms, DCD: 40-20, 2tx

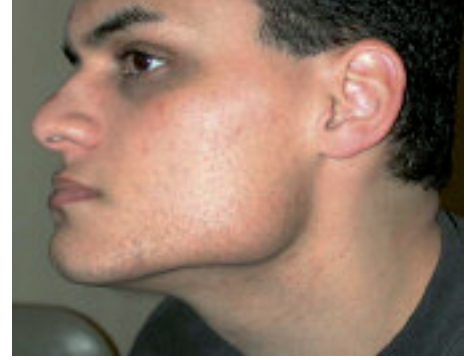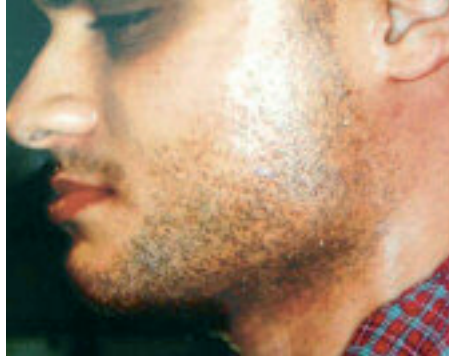

Deri Tipi V 12 mm, 25-40 J/cm², 3 ms, DCD: 40-30, 3tx

Psödofolikülit Barbae (PFB)



Skin Type VI 12 mm, 16-24 J/cm², 3 ms, DCD: 40-30, 3tx

Vaka İnceleme

No. **1**

Bacak Damarları

Tedavi Parametreleri : 3 mm, 280 J/cm², 40 ms, DCD: 40-10



Tedavi öncesi (11/25/03)



Tedavi sonrası, Alt Damarlar
(11/25/03)



Tedavi sonrası, Alt Damarlar
(11/25/03)



Tedavi sonrası
(11/26/03)



Tedavi sonrası
(12/01/03)



Tedavi sonrası
(12/08/03)



Tedavi sonrası
(12/11/03)



Tedavi sonrası
(12/16/03)



Bacak Damarları 3 mm, 290 J/cm², 60 ms, 40-30, 1tx
Damar çapı 1.5 mm'den küçük

6 mm, 160 J/cm², 60 ms, 40-30, 1tx
Damar çapı 1.5 mm'den büyük

Fotoğrafları temin eden: Laurie M. Hobbs, M.D., Simon Ourian, M.D., Victor Ross, M.D.

Candela Corporation
530 Boston Post Road
Wayland, MA 01778 USA
Phone: (508) 358-7 637
Fax: (508) 358-5569
Toll Free: (800) 821-2013
www.candelalaser.com



CANDELA
BE CONFIDENT